



SharpSmart Access Plus INSTRUCCIONES DE USO




ABRIR

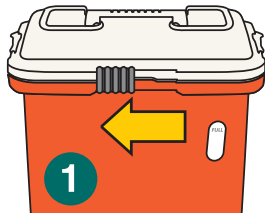

1. Resbale la cerradura frontal a la izquierda.

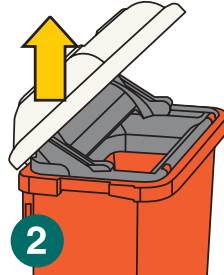


2. Levante la tapa a la mitad para abrir la caja parcialmente.

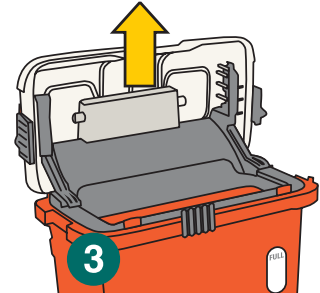


3. Levante la tapa por completo para abrir totalmente la caja.

USO

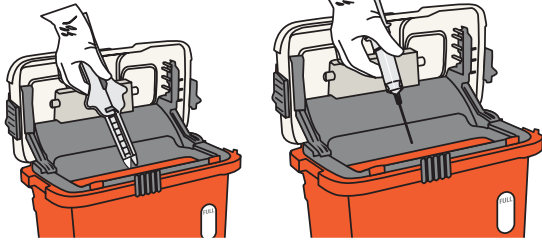


1. Meta los artículos punteados a la caja con la punta hacia abajo.

LLENA

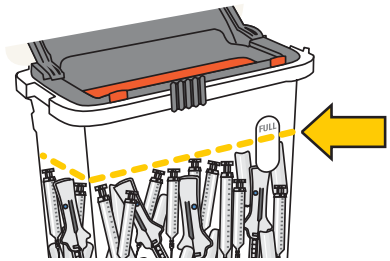


Cuando los artículos punteados lleguen al nivel indicado, la caja Access Plus está llena y debe ser cerrada y reemplazada.

CERRAR

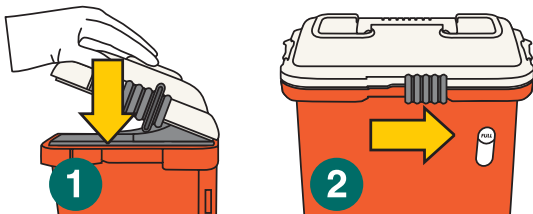

1. Presione la tapa hacia abajo firmemente.
2. Resbale la cerradura frontal totalmente hacia la derecha.

ATRANCAR

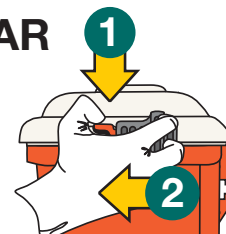

1. Oprima las lengüetas rojas.
2. Resbale las cerraduras completamente hacia adelante.

NOTA: ¡Las cerraduras laterales son permanentes!

RECUERDE:

- **NUNCA PONGA LAS MANOS DENTRO DE LA CAJA**
- **SIEMPRE CIERRE LA CAJA ANTES DE MOVERLA/REMOVERLA**
- **NO ESCRIBA EN O MALTRATE LA CAJA**
- **SIEMPRE DESECHE LAS JERINGAS Y SUS COMPONENTES DE SEGURIDAD EN LA CAJA CORRESPONDIENTE**